


A6 简易操作流程

备注：如下图 1、电源开关按钮 2、声音关闭按钮 3、混合气体开关按钮
4、报警灯 5、供电状态指示灯 6 流量调节按钮 7、笑气浓度调节按钮

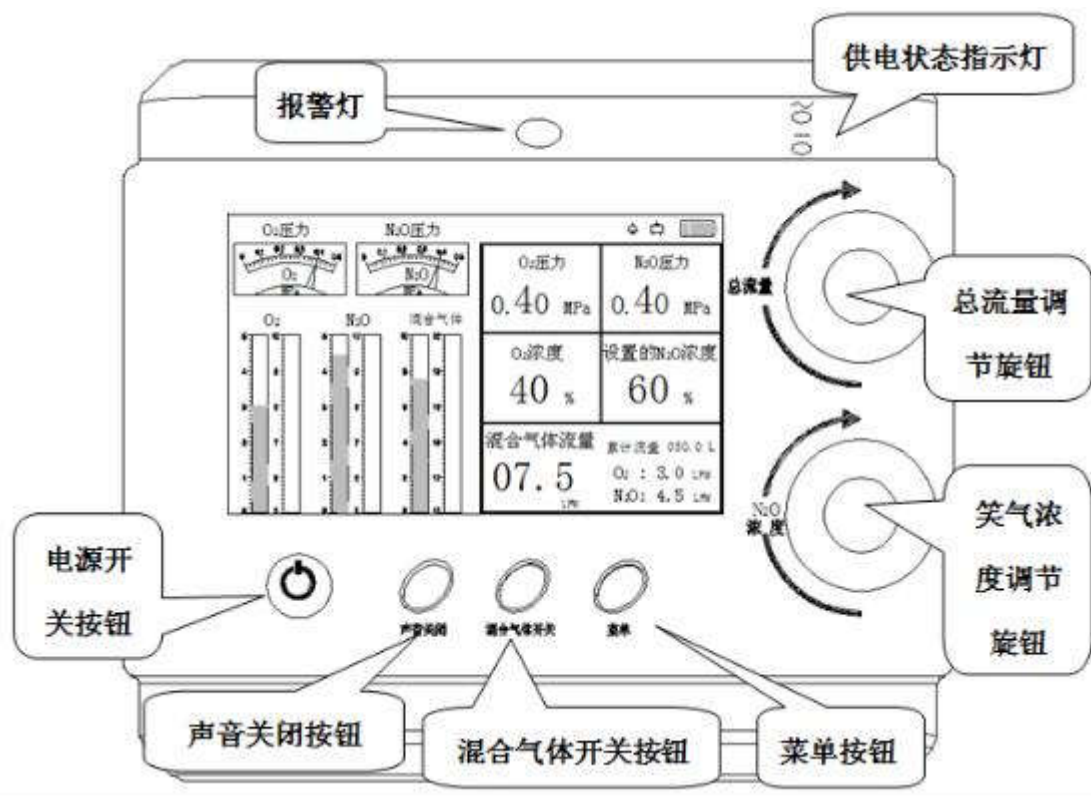

一、机器报警；

①首先检查笑气，氧气的气体供应是否正常。

②观察仪器界面上的笑气，氧气压力值是否低于 0.15，如低于 0.15 说明气瓶气源不足，应及时更换气体。

二、消毒于保养：

①每次使用完后，清洁消毒。

②每天使用仪器时都应检查管道连接是否正确，管道有无堵塞物

③仪器不使用时，需把仪器关机，气体来源切

